

SEGO®

A smart, hygienic decision

Sego®Connect Module Advanced

Installation und Bedienung

com | G@ | tec®

Messtechnik GmbH

Rev. 3.0

Stand 2017-12-07

Inhaltsverzeichnis

Installation und Bedienung.....	1
1 Einführung.....	3
2 Produkt Features.....	4
3 Beschreibung der Anschlüsse und Anzeigen.....	5
4 Herstellen der Verbindung.....	6
5 Webserver.....	7
6 Technische Daten.....	8



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Gebrauchsanweisung und beachten Sie alle Sicherheitshinweise!

1 Einführung

Haftungsausschluß

Comcotec übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

Haftungsansprüche gegen Comcotec, die sich auf mittelbare oder unmittelbare Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden seitens Comcotec vorliegt.

Der Support erstreckt sich nicht auf den Anschluss der Geräte mittels Hardwareadapter oder Schnittstellenumsetzer, wie beispielsweise USB-RS232-Adapter oder Blue Tooth-RS232-Adapter, die nicht von Comcotec geliefert wurden. Eine sichere Kommunikation kann mit diesen Adaptern oder Umsetzern nicht gewährleistet werden.

Packungsinhalt

- SegoConnect Module Advanced (Artikel 22823)
- Gerätepass

optional:

- Stromversorgung (Steckernetzteil)
 - RS232 Kabel
 - RJ45 Netzkabel Cat. V
- (entsprechende Kabel sind als Zubehör in verschiedenen Längen erhältlich)



Verwenden Sie bitte ausschliesslich das mitgelieferte Steckernetzteil, da das Gerät ansonsten irreparable Schäden davontragen könnte!

2 Produkt Features

Das SegoConnect Module Advanced ist ein speziell konzipierter Seriell-auf-Netzwerk-Umsetzer und zeichnet sich besonders durch folgende Merkmale aus:

- ▣ Robustes Design, max. Flächenlast > 100kg
- ▣ Spritzwasser- und staubgeschützt gemäß IP 41
- ▣ Diagnose mittels integriertem Webserver
- ▣ Power over Ethernet (PoE) Fähigkeit


Was bedeutet Power over Ethernet?

Power over Ethernet, kurz PoE, ist die Möglichkeit der direkten Stromversorgung über die bestehende Netzwerkinfrastruktur. Durch die Nutzung von PoE kann bei Geräten, die diesen Standard unterstützen, eine eigene Stromversorgung entfallen, da sie direkt über das Netzwerk gespeist werden. Die Vorteile dieser Technik liegen vor allem darin, dass kein Netzanschluss in Gerätenähe mehr benötigt wird und dass die Anzahl der erforderlichen Zuleitungen auf ein Minimum reduziert werden kann.

Bitte beachten Sie, dass Ihre bestehende Netzwerkhardware PoE unterstützen muss, um dieses Merkmal nutzen zu können!

3 Beschreibung der Anschlüsse und Anzeigen

Anschlüsse und Anzeigen auf der Rückseite

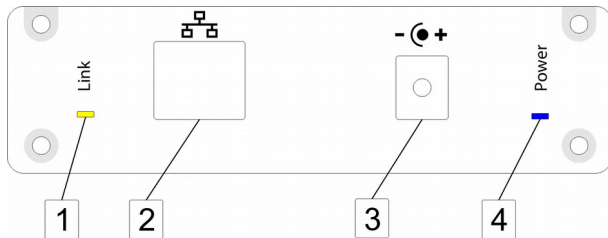

1| LED Link

Die LED blinkt gelb, wenn Daten über das Netzwerk übertragen werden.

2| Ethernetanschluss

Verbinden Sie hier das Connect-Modul mit Ihrem Netzwerk. Verfügt Ihr Netzwerk über PoE-Funktionalität, wird das Modul über diesen Anschluss mit Strom versorgt.


3| DC Anschlussbuchse

Hierüber wird das Modul mit Spannung versorgt, falls Ihr Netzwerk nicht PoE fähig ist.

4| LED Power

Die LED leuchtet blau, wenn das Modul ausreichend mit Strom versorgt wird,

Anschlüsse und Anzeigen auf der Frontseite

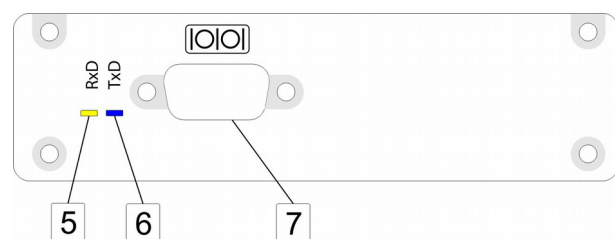

5| Empfangs-LED

Diese LED blinkt gelb, wenn das Modul Daten vom aufzuzeichnenden Gerät über die serielle Schnittstelle empfängt.

6| Sende-LED

Diese LED blinkt blau, wenn das Modul Daten an das aufzuzeichnende Gerät über die serielle Schnittstelle sendet.

7| Serielle Schnittstelle

Verbinden Sie hier das aufzuzeichnende Gerät mit dem Modul. Benutzen Sie hierzu die originale Anschlussleitung. Die serielle Schnittstelle ist galvanisch getrennt, daher empfiehlt sich die Verwendung von Leitungen, deren Schirmung einseitig durchtrennt ist, um so eine galvanische Kopplung der Schirme über das Gehäuse zu verhindern.

4 Herstellen der Verbindung

Das SegoConnet Module Advanced weist insgesamt drei Anschlüsse auf. Das Herstellen der Verbindung zwischen Endgerät und Netzwerk erfolgt in drei einfachen Schritten:

- Schritt 1: Stellen Sie die Netzwerkverbindung mittels des Netzkabels her (Anschluss 2). Wenn die Power-LED blau leuchtet, verfügt Ihr Netzwerk über PoE-Funktionalität und Sie brauchen Schritt 3 nicht auszuführen.
- Schritt 2: Verbinden Sie die serielle Schnittstelle (Anschluss 7) mit dem Endgerät. Schalten Sie hierzu das aufzuzeichnende Gerät möglichst aus.
- Schritt 3: Falls Ihr Netzwerk nicht PoE-fähig ist (siehe Schritt 1), verbinden Sie das Modul mittels des im Lieferumfang enthaltenem Steckernetzteils mit dem Stromnetz (Anschluss 3). Sobald das Modul Spannung bekommt, leuchtet die blaue Power-LED auf.

Die Konfiguration des SegoConnect Moduls im Netzwerk erfolgt über UDP.

5 Webserver

Im SegoConnect Module ist zu Diagnosezwecken eine Webbrowser-Schnittstelle integriert. Wenn Sie in der Adresszeile Ihres Webbrowsers die IP-Adresse eingeben, die Sie für das Sego®Connect Module konfiguriert haben, erscheint der Startbildschirm des integrierten Webservers.

Von dort aus können Sie verschiedene Status- und Diagnoseseiten aufrufen. Durch Klick auf *Module Status* gelangen Sie beispielsweise auf eine Seite, die Ihnen den aktuellen Status des Moduls anzeigt.

SegoConnect Module Advanced Status

Status	Value
System	running
Firmware	SCM-MK2 Version 1.10
Runtime	00:12:38
MAC Address	00-30-56-90-7E-56
Network speed	100 MBit/s
ETH Mode	Full Duplex
Connection	192.168.10.160
Transfer RS232->TCP	0 Bytes
Last RS232 transfer	00:00:00
Transfer TCP->RS232	6 Bytes
Last TCP transfer	00:12:33
UDP Packets	0
Last UDP transfer	00:00:00

Abb.: Statusseite wie im Web-Browser angezeigt

Diese Diagnosefunktion kann auch der technische Support von Comcotec nutzen, um Fehler per Fernzugriff zu erkennen und zu beseitigen, falls dies gewünscht und gestattet ist. Zusätzlich können die aktuelle Konfiguration sowie die Systemereignisliste des Moduls über Webbrowser angezeigt werden.

6 Technische Daten

Spezifikationen

Masse und Gewicht:	Höhe:	33mm
	Länge:	91mm
	Breite:	109mm
	Gewicht:	220g

Spannungsversorgung: 13-24V DC über DC Anschlussbuchse



Hohlstecker, Durchmesser 5,5 mm aussen (-) und 2,1 mm innen (+)

alternativ: 36-57V über PoE (Class 3 nach IEEE 802.3af)

Stromaufnahme: 160mA bei 15V

Umgebungsbedingungen: Temperatur: 0 - 45°C



Nur zur Verwendung in geschlossenen, trockenen Räumen!


Netzwerkschnittstelle: 10MBit/100Mbit, half Duplex und full Duplex
autosensing, PoE (Power over Ethernet)

Serielle Schnittstelle: RS232 Standard (D-Sub male 9 polig), Datenleitungen
galvanisch getrennt mittels Optokoppler
Isolationsspannung (Optokoppler) 1,5kV

maximal 115200 baud.

Sonstiges: Das Gerät ist nicht zum Betrieb in einem medizinischen
Netzwerk geeignet.

Hinweise zur Entsorgung

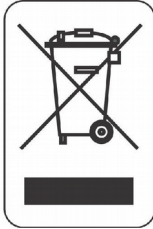

Dieses Gerät darf nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden. Eine unangemessene Entsorgung kann sich schädlich auf die Umwelt und die Gesundheit auswirken.

Bitte beachten Sie die Hinweise der für Ihren Ort zuständigen Behörden zu den für Sie geltenden Rückgabe- und Sammelverfahren!